



## LOW BACK LØFTESEJL

Halvsejl, som giver en god kontakt mellem bruger og hjælper

### ANVENDELSE

- Anvendes til brugere med en god kontrol af hoved og overkrop.
- Anvendes til forflytninger fra siddende og halvsiddende stilling.
- Anvendes til forflytninger i mobile og stationære personløftere.

### EGENSKABER

- Sejlet lægges på siddende fra kørestol/stol.
- Sejlet giver en god støtte under låret og ryggen fra bækkenet til skulderbladet.
- Sejlet giver brugeren en god opretsiddende stilling, der letter positionering af brugeren.
- Sædeåbningen letter af- og påklædningen.
- Delte polstrede benstropper.
- Medium sædeåbning.
- Udformet i polyester, som er holdbart og nemt at rengøre.



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

SWL: 275 kg

Materiale: Polyester

Størrelser: XS-S-M-L-XL-XXL

### VARENUMRE

Low Back løftesejl - polyester

	Varenr.	HMI-nr.
<b>XS</b>	009-09633	72919
<b>S</b>	009-09634	72920
<b>M</b>	009-09635	72921
<b>L</b>	009-09636	72922
<b>XL</b>	009-09637	72923
<b>XXL</b>	009-09638	72924

## STØRRELSESGUIDE

Løftesejlet er udstyret med en farvet strop på ryggen for angivelse af størrelsen. Samtidig er stroppen en markering af midterlinjen, som sikrer en korrekt placering af sejlet ved pålægningen.

Farvekodens betydning fremgår af størrelsestabelen.

Billedet nedenfor viser rød farvekode, som betyder, at sejlet er i størrelse S (Small):



	XS	S	M	L	XL	XXL
Y (hoftemål)	37 cm	42 cm	48 cm	52 cm	68 cm	78 cm
X (mål fra nakken til bagdel)	50 cm	55 cm	66 cm	75 cm	75 cm	75 cm



For yderligere specifikationer, kontakt salg@winncare.dk. Alle tal og mål er vejledende og kan fravige i visse brugssituationer. Winncare Nordic forbeholder sig retten til ændringer uden forudgående meddelelse. Billederne kan indeholde tilbehør. Kontakt venligst salg@winncare.dk for mere info herom.



## KONTAKT OS FOR MERE INFORMATION

winncare.com

E-mail: info@winncare.dk

Telefon: +45 70273720

WIN  CARE